


Instrukcja użytkowania urządzeń firmy Merlion Sp. z o.o.

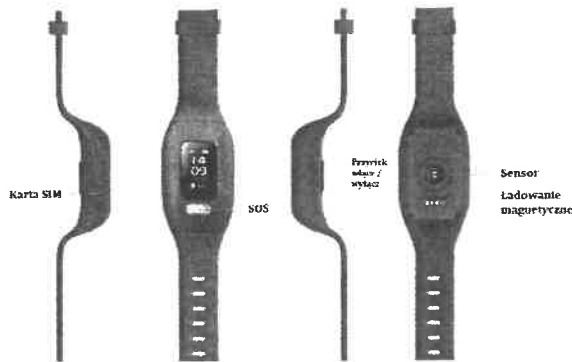

1. Korzystanie z urządzenia

- sprawdź, czy w pudełku znajduje się urządzenie wraz z ładowarką
- umieść w środku kartę SIM (w tym czasie sprzęt powinien być wyłączony)
- naładuj akumulator urządzenia za pomocą znajdującej się w komplecie ładowarki
- aby włączyć i wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przez kilka sekund przycisk zasilania
- aby uruchomić połączenie alarmowe, przytrzymaj przez kilka sekund przycisk „SOS”
- dotykowy ekran urządzenia pozwala na nawigację pomiędzy widokami.

2. Instrukcja użytkowania



- Główny ekran – małe ikonki w górnej części wyświetlacza pokazują (w kolejności od lewej do prawej): poziom sygnału GSM / tryb dzwonka / sieć GPRS / lokalizacja WIFI / poziom baterii. Na ekranie głównym wyświetlana jest również aktualna data i godzina.



- Puls – aplikacja służąca do pomiaru pulsu oraz ciśnienia. Dotknięcie ikony rozpoczyna pomiar.



- Wyniki pomiaru – wartość pulsu oraz ciśnienia zostaje wyświetlona na ekranie urządzenia po zakończeniu pomiaru.



- Dobre Wsparcie – dotknięcie ikony przenosi do menu, zawierającego informacje na temat numeru IMEI opaski.



- Kod opaski – dotknięcie pozycji w menu wyświetli na ekranie nr IMEI urządzenia wraz z kodem QR.



- Widok pokazujący nr IMEI opaski oraz kod QR.

OPIS TECHNICZNY OPASKI

Model: S3

Wymiary: 63*34*18mm

Waga: 55g

Bateria: 500mAh

Wyświetlacz: 0,96" OLED (160x80px)

Ekran dotykowy: Tak

Wodoodporność: Tak (IP67)

Karta SIM: nanoSIM

Czujnik wstrząsu: Tak

GPS: Tak

Czujnik ciśnienia krwi: Tak

Czujnik pulsu: Tak

Krokomierz: Tak

Ładowarka: magnetyczna